

|                                                                                                                         |                                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  <b>AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ</b><br>2006 | <b>LAZER CİHAZI KULLANMA<br/>TALİMATI</b> | Doküman No       | <b>TL-092</b>     |
|                                                                                                                         |                                           | İlk Yayın Tarihi | <b>10.10.2017</b> |
|                                                                                                                         |                                           | Revizyon Tarihi  |                   |
|                                                                                                                         |                                           | Revizyon No      |                   |
|                                                                                                                         |                                           | Sayfa            | <b>1/1</b>        |

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Dokuları ısıtmanın yanı sıra Kalsifik birikintileri de yok ederek adezyonları çözer.

## 2. SORUMLULAR

Ünite sorumlusu öğretim elemanı.

## 3. UYGULAMA

3.1- Üzerinizde ve hasta üzerinde metal eşya olmadığından emin olunuz.

3.2- Cihazın güç kablosunu kontrol ederek ezilme, kopma vb. durum varsa teknik ekiple irtibata geçiniz.

3.3- Lazer probunu ve kablosunu kontrol ederek ezilme, kopma vb. durum varsa teknik ekiple irtibata geçiniz.

3.4- Lazer uygulaması için koruyucu gözlük kullanmayı unutmayınız.

3.5- Vakanın akut, subakut veya kronik olma durumuna göre lazer akımının şiddetine karar veriniz.

3.6- Penetrasyon derinliğine göre lazer akımının frekansına karar veriniz.

3.7- Cihazı kapatma düğmesinden kapatarak fişini çekiniz. Probu cihazın yan tarafındaki ilgili bölme koyunuz.

|                         |                             |                        |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hazırlayan              | Yürürlük Onayı              | Kalite Sistem Onayı    |
| Arş. Gör. Caner KARARTI | Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM | Prof. Dr. Mustafa KURT |