



# ARTERİYEL KAN ALMA ÜST EXTREMİTE MAKETİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-141
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

## 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Arteriyel kan alma maketinin uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Arteriyel kan alma maketi kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

## 3.TALİMATIN DETAYI:

- Sentetik arteriyel kan örneği hazırlanması:
- Konsantre kan renklendiricisine dilue suyla doldurunuz ve yavaş bir şekilde çalkalayınız. Arıdan kan damarı setine koyunuz.
- Damar sisteminin kapalı olduğuna emin olduktan sonra maketin damar setine yapay kan setini bağlayınız.
- Damar sistemini açınız ve yapay kanı makete doğru hareket ettiriniz.
- El pompasıyla maketin basıncını oluşturunuz ve basınç için pompanın klempini kapatınız
- Simulatörde pratiklerin uygulanması
  - Radial arter yüzeindedir ve kolayca hissedilerek enjektör ile kullanım öncesi kontrol ediniz.
  - Brakial arter 1,5cm aşağıdadır. Enjektör ile derine girerek kontrol ediniz
- Yapay kan için başka sıvı kullanmayınız
- Enjektörler daha önce kullanılmamış ve yeni olmalıdır.
- Kullanmadan önce maketin iyi sabitlendiğinden emin olunuz
- Maketin kullanımı en az bir öğretim görevlisi gözetiminde olmalıdır.

Pratik bitiminde maketi temiz, yapay damarlardaki sıvı boşaltılmış olarak bırakınız.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN	Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT