



ERKEK İDRAR SONDASI UYGULAMA MAKETİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-142
İlk Yayın Tarihi	09.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Erkek idrar sondası uygulama maketinin uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Erkek idrar sondası uygulama maketi kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3. TALİMATIN DETAYI:

- Bu maket kutusunda şunlar bulunmalıdır.
- A Erkek kateterizasyon simulatörü
- B. Simulatör kayganlaştırıcı
- C. 16 French foley silikon kateter
- D. Sıvı uygulama seti
- E. Obstrüksiyon açma aleti
- Bu model modern plastikten üretilmiştir ve erkek vücudunu simule etmektedir.
- Bu modeli kullanmadan önce mesanesini sıvı ile doldurmak için serum setini askıya takıp idrar kesesini doldurmak için kullandığımız A kateteri ile mesane doldurulur ve klemlenir.
- Ardından takacağımız idrar yolu kateterinin uç kısmı kayganlaştırıcı (lubrikant) madde ile kaygan hale getirilir
- Erkek penisi glans penis proksimalinden tutularak üretranın düzgün bir hal alması sağlanır
- Kayganlaşmış haldeki 16 french kateter dik bir şekilde üretral orifisten sokulur.
- İçinden sıvı gelmeye başlayınca klemlenir ve foley sondanın balonu şişirilir.
- Maket enjeksiyon için uygun değildir o nedenle herhangi bir enjeksiyon yapmayınız.
- Ders bitiminde maket mesanesindeki sıvı boşaltılarak poşeti ile birlikte kutusunda saklanmalıdır.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT