



# İNTRAVENÖZ GİRİŞİM MAKETİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-144
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

## 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Intravenöz girişim maketinin uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Intravenöz girişim maketinin kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

## 3.TALİMATIN DETAYI:

- Bu maket intravenöz damaryolu açma,
- Kan alma,
- Enjeksiyon yapma becerilerini geliştirmek için kullanılır.
- Bu maket içerisinde bir adet üst ekstremitte maketi, yapay kan oluşturma sıvısı, serum seti ve serum şişesi ve askısı bulunmaktadır.
- Bu maketi kullanmadan önce serum seti hazırlanıp serum askısına takılıp, bağlantı kablosu takılır. Bu bağlamayı yaparken serum setindeki sıvı akışı durdurulmalıdır.
- İntravenöz girişimler öğretim görevlisi gözetimde yapılmalıdır.
- İşleme başlamadan önce maketin sabitlendiğinden emin olunuz.
- Pratik başlamadan önce serum sıvısına 1 cc yapay kan model oluştucu sıvıdan enjekte ediniz.
- Makette serum sıvısı ve yapay kan oluşturuvcu sıvıdan başka sıvı kullanmayınız.
- Girişim yapılacak enjektörler yeni ve kullanılmamış olmalıdır.
- İv girişim yaparken damar sabitlenmeli, 30 derece açıyla damar yanındaki cilt altına girilip sonra damara doğru açılıp damara girilip ardından damar trasesi boyunca ilerlenir. Bu esnada temel iv girişim güvenlik kuralları dikkate alınır.
- Maket üzerinde damar olmayan alanlara gereksiz enjeksiyonlar yapılmamalıdır.
- Pratik eğitim sonrası yapay kan sıvısı sökülmesi ve içi boşaltılmalıdır.
- Maket üzerinde saplanmış enjektör iğne bırakılmamalıdır.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT