



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ MAKETİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-147
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Temel yaşam desteği maketinin uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Temel yaşam desteği maketi kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3. TALİMATIN DETAYI:

- Temel yaşam desteği maketi kalbi ve solunumu duran kişilere kardiyopulmoner destekte bulunmak için yapılması gerekenlerin öğretilmesi için geliştirilmiş makettir.
- Maket göğüs bölgesi açık ve altında masaj yapmaya uygun yay bulunduran bir adet üst vücut bölgesinden ibarettir.
- Maket üzerinde kalp masajı sternumun tam ortası hesaplanarak oraya yapılmalıdır
- Kalp masajı yaparken göğüs kafesi 5-6 cm kadar çöktürülmelidir. Daha az ya da daha derin kompresyonlar doğru değildir ve makete de zarar verir.
- Kalp masajı yaparken masa üzerine koyduğumuz maketi kendi vücudumuza yaklaştırarak iki elimizi parmaklarımızdan kenetleyip dik olarak masaj yapmalıyız.
- Kalp masajı temel yaşam desteğinde 30/2 oranında yapılır. Yani 30 masaj sonrası 2 soluk verilir ardından tekrar 30 masaja başlanır.
- Maketin sabitlenmesi ve yere düşürülmemesine dikkat edilmelidir.
- Maket üzerine kağıt ya da plastik herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır.
- Maketle uygulama eğitimi bittiğinde kutusuna yerleştirilmelidir.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT