

 <p>2006</p>	<b>TRANSPARAN KARŞILAŞTIRMALI İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TL-149</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>17.10.2017</b>
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	<b>1/1</b>

### 1. AMAÇ VE KAPSAM:

Transparan karşılaştırılmalı intramuskuler enjeksiyon modelinin uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

### 2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Transparan karşılaştırılmalı intramuskuler enjeksiyon modelin kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

### 3. TALİMATIN DETAYI:

- Kalçadan doğru enjeksiyon yapmak için geliştirilen bu maket transparan özellikli olup maketin bir tarafı enjeksiyon bölgesi altındaki sinir, kemik ve damar yapılarını göstermektedir.
- Maket aynı zamanda nervus iskiyadikusun gözlemlenmesine ve enjeksiyon esnasında zarar verilmemesine olanak sağlamaktadır.
- Maket normal insan boyutlarında olup enjeksiyon kurallarına uyarak doğru yere enjeksiyon yapılmasını sağlamak için sinyal verme özelliğine sahiptir.
- Enjeksiyon yaparken normal insanda olduğu gibi maket üzerinde de gluteus maximus orta kısmından 4 eşit parçaya bölünerek dış üst kısmına enjeksiyon yapılır.
- Enjeksiyon doğru şekilde yapıldığında makette yeşil ışık yanar ve işlemin doğruluğu onaylanır.
- Enjeksiyon yanlış şekilde yapıldığında makette kırmızı ışık yanar ve işlemin yanlışlığı bildirilir.
- Makete enjeksiyon öğretim görevlisi eşliğinde yapılmalıdır.
- Gereksiz yere ve yanlış bölgelere enjeksiyondan kaçınılmalıdır.
- Maket kullanıldıktan sonra poşeti ile kutusuna konulmalıdır.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT