



İNTRADERMAL ENJEKSİYON SİMULATÖRÜ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-150
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Intradermal enjeksiyon simulatörünün uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Intradermal enjeksiyon simulatörünün kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- Bu maket intradermal enjeksiyon pratiğinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
- Enjeksiyonda distile su kullanılmalıdır.
- Yeni ve kullanılmamış enjektörlerin kullanılmalıdır.
- Maket insan ön kolunu simüle etmektedir.
- Ön kol maketinde 4 adet iç yüzde 4 adet de dış yüzde intradermal enjeksiyon yapılacak alan vardır. Bu alanlar dışında enjeksiyon yapmayınız. Gereksiz enjeksiyonlardan kaçınınız.
- 25 gauge enjektör ucu ile 3/8 ila 1/2 enjektör uzunluğu derinliğinde enjeksiyon yapılmalıdır.
- Pratik uygulamalar en az bir öğretim görevlisi gözetiminde yapılmalıdır.
- Maketin pratik yapmadan önce sabitlendiğinden emin olunuz.
- Patrik bitiminde makete saplı enjektör bırakmayınız. Sabunlu suyla temizleyip kuruladıktan sonra kapatıcı losyon(nasco cleaner) ile iğne giriş deliklerini kapatmak için kullanınız.
- ASLA maket üzerine herhangi bir kağıt ya da plastik yapıştırmayınız.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT